



La couleur du godet est spécifique du diamètre de la sonde.



Toutes les sondes LoFric sont dotées du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Il permet à la sonde de rester glissante et sûre aussi bien à l'insertion qu'au retrait.

Oeilllets doux



Recommandation d'utilisation

La sonde à usage unique LoFric® est recommandée pour le sondage urinaire intermittent, à domicile ou à l'hôpital, ainsi que pour la dilatation.

Stérilisation et durée de conservation

Toutes les sondes sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène (EtO). La date limite d'utilisation est imprimée sur l'emballage.

Conditionnement

Boîte de 30 sondes.
4 boîtes par carton.

La gamme

Référence	Code ACL	Descriptif	Taille
400 08 70	3401096642919	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 08
400 10 70	3401096643169	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 10
400 12 70	3401096643220	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 12
400 14 70	3401096643398	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 14
400 16 70	3401096643459	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 16
400 18 70	3401096643510	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 18
400 20 70	3401096643688	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 20
400 22 70	3401096643749	LoFric® Nelaton 40 cm	CH 22
401 06 70	3401096643800	LoFric® Nelaton Péd. 20 cm	CH 06
401 08 70	3401096643978	LoFric® Nelaton Péd. 20 cm	CH 08
401 10 70	3401096644050	LoFric® Nelaton Péd. 20 cm	CH 10
402 08 70	3401096644289	LoFric® Nelaton Péd. 30 cm	CH 08
402 10 70	3401096644340	LoFric® Nelaton Péd. 30 cm	CH 10
403 08 70	3401096642278	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 08
403 10 70	3401096642339	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 10
403 12 70	3401096642568	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 12
403 14 70	3401096642629	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 14
403 16 70	3401096642797	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 16
403 18 70	3401096642858	LoFric® Nelaton 20 cm	CH 18
404 08 70	3401096605198	LoFric® Nelaton 15 cm	CH 08
404 10 70	3401096605259	LoFric® Nelaton 15 cm	CH 10
404 12 70	3401096605310	LoFric® Nelaton 15 cm	CH 12
404 14 70	3401096605488	LoFric® Nelaton 15 cm	CH 14
405 10 70	3401096644401	LoFric® Béquillée 40 cm	CH 10
405 12 70	3401096644579	LoFric® Béquillée 40 cm	CH 12
405 14 70	3401096644630	LoFric® Béquillée 40 cm	CH 14
405 16 70	3401096644869	LoFric® Béquillée 40 cm	CH 16
405 18 70	3401096644920	LoFric® Béquillée 40 cm	CH 18

Remboursement sécurité sociale à 60% ou 100% pour le patient en A.L.D. Inscrit sur la LPPR sous la référence 6161359.

LoFric®

* Une vraie différence


Mode d'emploi

Informations Importantes


S'assurer que la technique du sondage est enseignée à l'utilisatrice.

Commencer par un lavage des mains à l'eau et au savon.


Ce produit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Möndal Suède, organisme notifié N°2797. Une fois utilisé, le revêtement sera altéré et la sonde ne sera plus stérile. Utiliser exclusivement la solution (eau, sel) fournie pour humidifier la sonde. Lire attentivement le mode d'emploi.

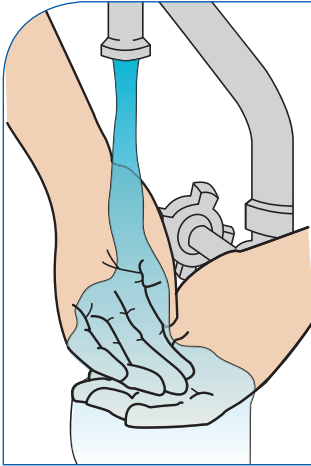


1. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.

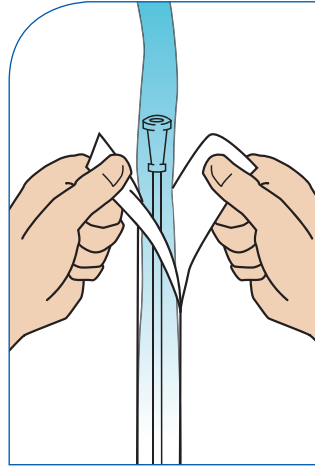


2. Ouvrez en tirant sur les deux volets de l'emballage sur une longueur de 5 à 6 cm. Versez l'eau directement dans l'emballage. Il est possible d'utiliser de l'eau du robinet (potable), de l'eau stérile ou encore du sérum physiologique.

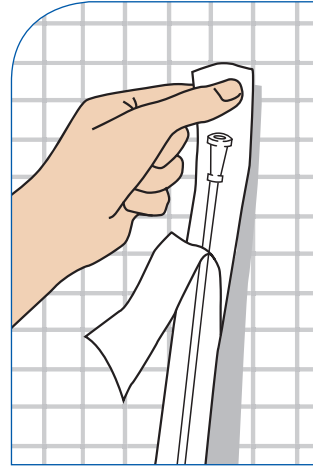


3. L'emballage présente une pastille adhésive. Enlevez le film protecteur bleu et fixez l'emballage sur une surface bien sèche.

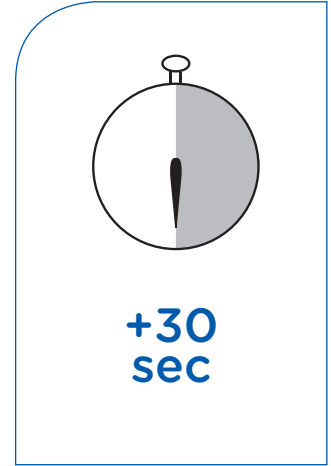

4. Laissez la sonde s'imprégner d'eau pendant 30 secondes.

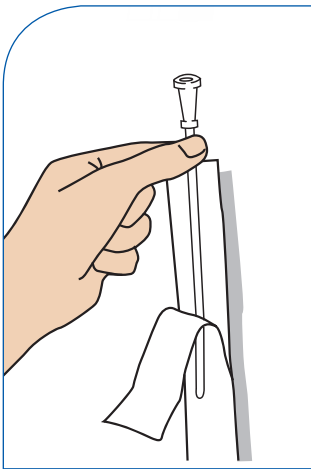

5. La sonde est prête à être insérée.

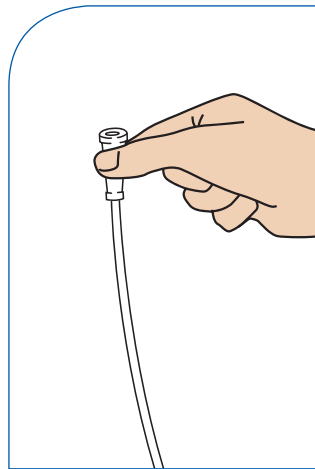

6. Récupérez la sonde dans l'emballage, effectuez le sondage le plus tôt possible puis jetez la sonde après utilisation.