

LoFric Hydro-Kit – pour hommes

Kit de sondage urinaire hydrophile LoFric® Hydro-Kit™ à usage unique avec solution saline pour activation.

Pour le sondage urinaire intermittent à court et long terme.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.


Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l'éducation sur la pratique du sondage.

Pour plus d'informations et des instructions complètes, veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans l'emballage.

N'hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : février 2022.

Mode d'emploi

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
2. Tenez le produit à la verticale. Pliez et pressez le sachet. Laissez la solution saline couler le long de la sonde.
3. Retournez le produit pour que la solution saline s'écoule dans la poche de recueil.
4. Utilisez la boucle pour déchirer la prédécoupe "A".
5. Utilisez la boucle pour déchirer la prédécoupe "B/C". Utilisez la section "B" en guise de guide d'insertion.
6. Pour assurer une étanchéité optimale entre la sonde et la poche, faites sortir doucement la sonde jusqu'à ce que le godet (embout coloré) soit à la butée.
7. Soulevez le pénis vers le ventre pour redresser l'urètre. Lorsque l'urine commence à s'écouler, insérez la sonde un peu plus pour vous assurer que les deux oeilletons sont à l'intérieur de la vessie.
8. Inclinez le pénis vers le bas lorsque l'urine commence à s'écouler de la sonde.
9. Lorsque l'écoulement d'urine s'arrête, retirez lentement la sonde. Si l'urine recommence à couler, attendez qu'elle s'arrête pour vous assurer que la vessie est complètement vidée puis retirez la sonde.
10. Remplacez la sonde dans la poche de recueil.
11. Avant de jeter le kit, videz-le ou faites un noeud pour le vider et le jeter ultérieurement.

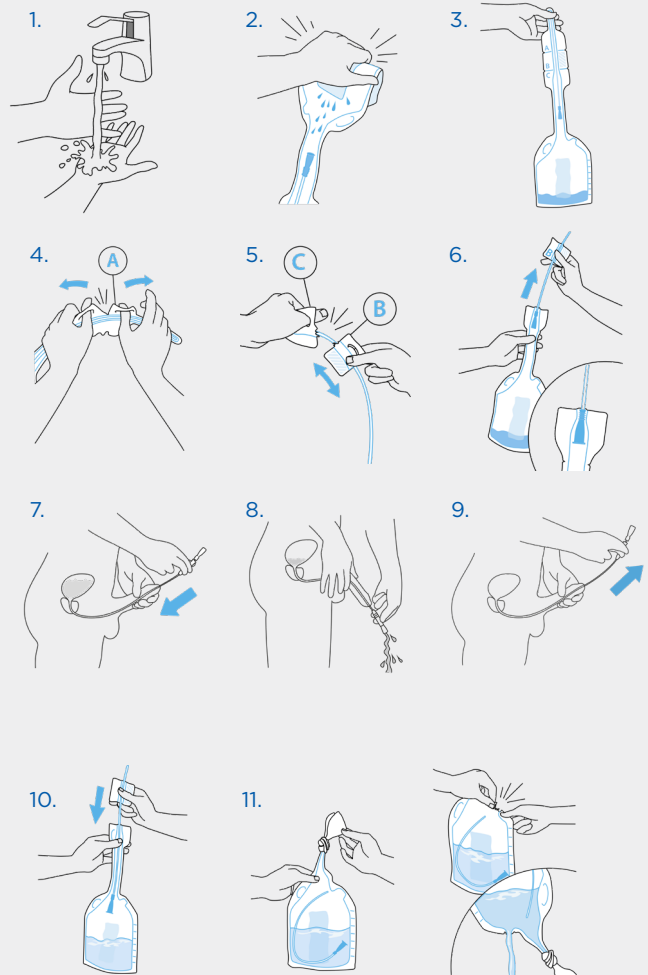


Instructions spécifiques pour les sondes Coudées/Tiemann, avec une extrémité légèrement béquillée.

Une technique spécifique est requise lorsque l'on utilise une sonde coudée/Tiemann. Contactez votre professionnel de santé pour obtenir une formation et des conseils.

1. Identifiez l'emplacement du marqueur, au niveau du godet, aligné avec l'extrémité béquillée de la sonde. Il vous aidera à maintenir l'extrémité béquillée dans la bonne direction pendant le sondage.
2. Maintenez l'extrémité béquillée vers le haut, en direction de l'estomac tout au long du sondage, de l'insertion jusqu'au retrait.

Tiemann/Coudé

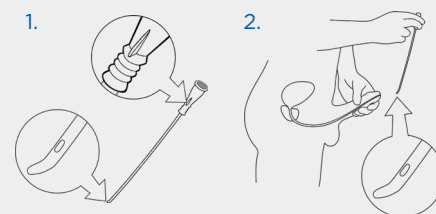

* UNE VRAIE DIFFÉRENCE

Chez Wellspect, nous estimons les personnes responsables de notre succès en tant que fournisseur majeur de produits innovants dans les troubles urinaires telle que la marque LoFric[®]. Grâce aux milliers d'utilisateurs et de professionnels de santé qui inspirent nos solutions innovantes à travers le monde, nous savons que travailler ensemble est le meilleur moyen d'améliorer la prise en charge de la continence, offrant à nos utilisateurs plus de temps pour leur vie. En nous appuyant sur plus de 35 années d'amélioration de la qualité de vie, nous œuvrons chaque jour passionnément à faire toujours mieux pour les utilisateurs de nos produits et services. **Wellspect. Une vraie différence.**

[wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)