


# Guide rapide LoFric Elle Pro

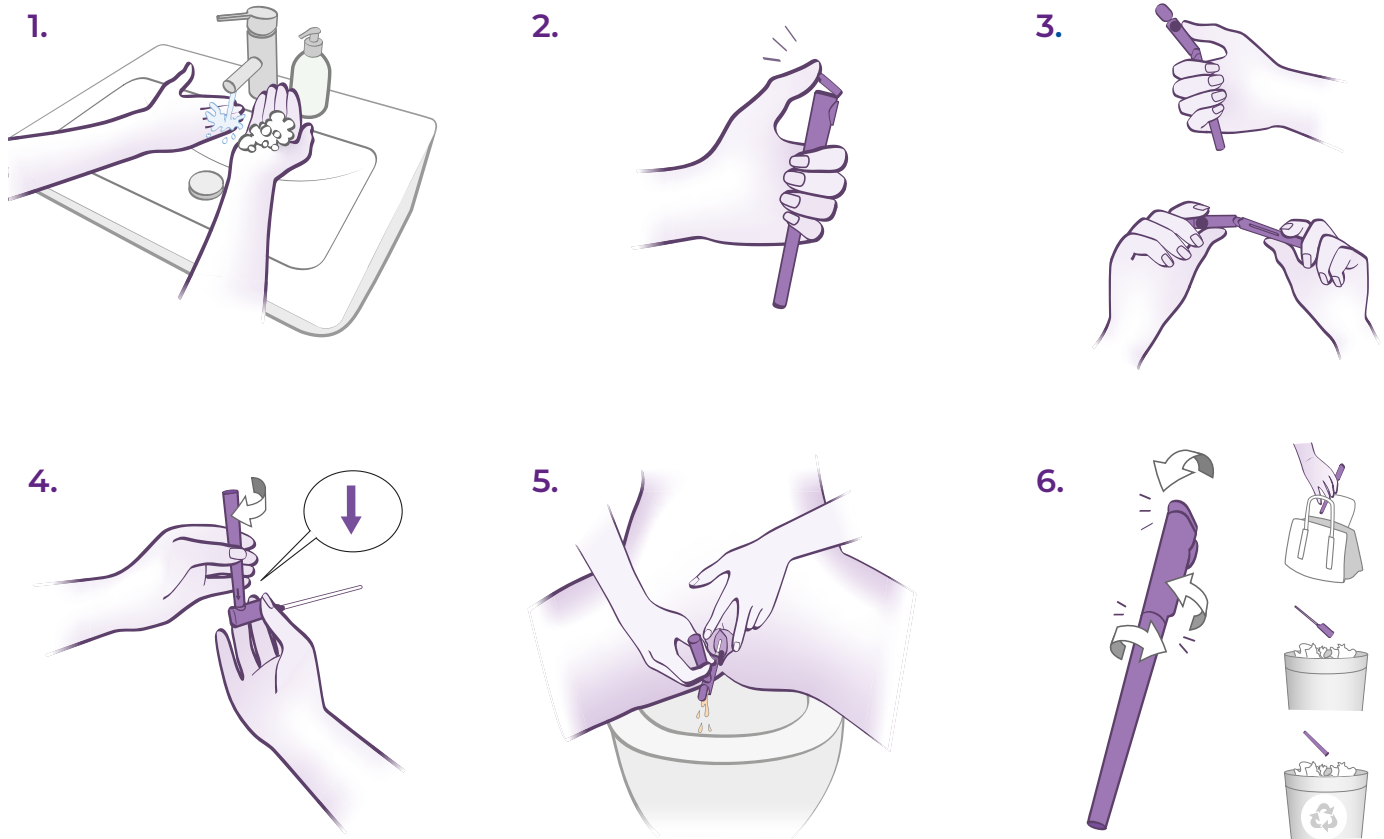

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
2. Ouvrez le capuchon supérieur.
3. Tenez la sonde dans une main et pliez légèrement la partie supérieure pour l'ouvrir. Sortez la sonde.
4. Connectez le réservoir sur la sonde par un simple quart de tour, assurez-vous que la flèche sur le réservoir pointe vers le bas.
5. Inclinez votre bassin vers l'avant, écartez et soulevez les lèvres pour repérer le méat.

Il est situé juste au-dessus de l'ouverture du vagin. Avec l'autre main, insérez doucement la sonde dans votre méat jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler, insérez légèrement plus pour assurer un flux continu.

Attendez jusqu'à ce que l'urine ne s'écoule plus, puis retirez lentement la sonde.

6. Remettez la sonde dans le réservoir. Jetez le tout, ou transportez-le dans votre sac jusqu'à jeter le tout.

Veuillez noter : le réservoir inférieur est recyclable.

## Informations importantes

LoFric® Elle™ Pro est une sonde urinaire hydrophile à usage unique, prête à l'emploi, avec de multiples orifices, conçue pour permettre une vidange complète de la vessie sans avoir à la repositionner.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué et stérilisé par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.

Pour adultes, adolescents et enfants de sexe féminin.

Indiquée pour la gestion de la vessie à court et long terme par sondage urinaire intermittent.

Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l'éducation sur la pratique du sondage.

Veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans la boîte pour les informations importantes et les instructions complètes.

N'hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : février 2026

Chez Wellspect, nous développons des produits et des solutions innovants qui font une vraie différence dans la vie des personnes ayant besoin de soins pour l'incontinence, leur permettant ainsi de profiter pleinement de chaque jour. Nous sommes un leader reconnu dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans grâce à nos marques LoFric® et Navina™, et nous continuons à élargir l'accès à nos solutions pratiques. Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir les normes de qualité les plus élevées tout en minimisant l'impact environnemental de nos produits. En travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé, nous visons à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

### **Wellspect. Une Vraie Différence.**

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [wellspect.fr](https://wellspect.fr)

Rejoignez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

**wellspect.fr**

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.

Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Téléphone : +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

