

## LoFric Origo – pour hommes

Sonde urinaire hydrophile LoFric® Origo™ à usage unique avec solution saline pour activation.

Pour le sondage urinaire intermittent à court et long terme.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.

Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l'éducation sur la pratique du sondage.


Pour plus d'informations et des instructions complètes, veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans l'emballage.

N'hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : février 2022.

### A. Astuce de rangement avant utilisation.


Pliable pour tenir dans une poche.

Utilisez la fente pour maintenir la sonde pliée.

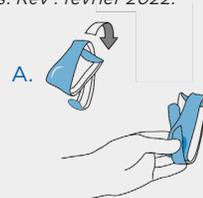

### Mode d'emploi

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
2. Pressez le sachet pour libérer la solution saline, la sonde est prête à l'emploi.
3. Tirez la languette vers le bas pour ouvrir l'emballage.
4. OPTION : utilisez la languette adhésive au dos pour suspendre l'emballage sur une surface sèche et propre.
5. Retirez la sonde. OPTION : tirez et ajustez le guide d'insertion situé au niveau du godet pour contrôler l'insertion sans avoir à toucher la sonde.
6. Soulevez le pénis vers le ventre pour redresser l'urètre. Lorsque l'urine commence à s'écouler, insérez la sonde un peu plus pour vous assurer que les deux oeillets sont à l'intérieur de la vessie.
7. Inclinez le pénis vers le bas lorsque l'urine commence à s'écouler de la sonde.
8. Lorsque l'écoulement d'urine s'arrête, retirez lentement la sonde. Si l'urine recommence à couler, attendez qu'elle s'arrête pour vous assurer que la vessie est complètement vidée puis retirez la sonde.
9. Après le sondage, remettez la sonde dans son emballage pour la jeter de manière appropriée.

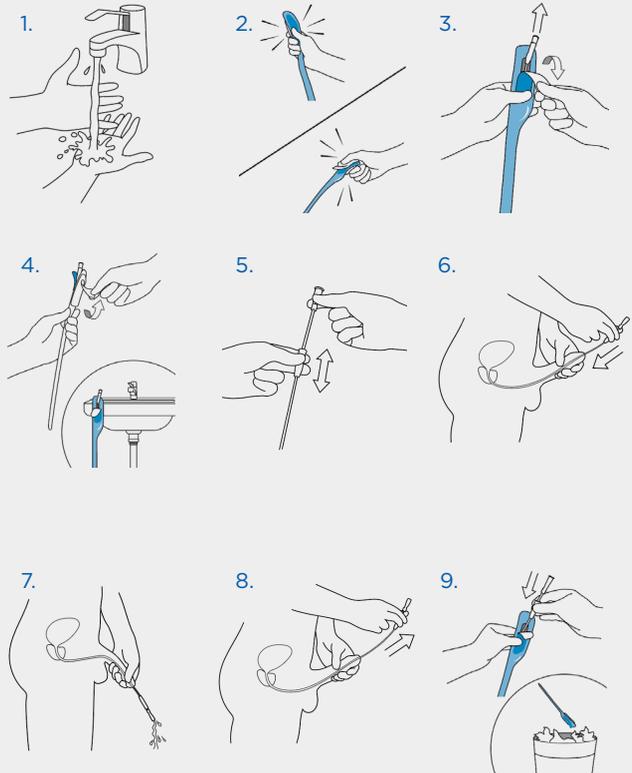


### Instructions spécifiques pour les sondes Coudées/Tiemann, avec une extrémité légèrement béquillée.

Une technique spécifique est requise lorsque l'on utilise une sonde coudée/Tiemann. Contactez votre professionnel de santé pour obtenir une formation et des conseils.

1. Identifiez l'emplacement du marqueur, au niveau du godet, aligné avec l'extrémité béquillée de la sonde. Il vous aidera à maintenir l'extrémité béquillée dans la bonne direction pendant le sondage.
2. Maintenez l'extrémité béquillée vers le haut, en direction de l'estomac tout au long du sondage, de l'insertion jusqu'au retrait.

### Tiemann/Coudé

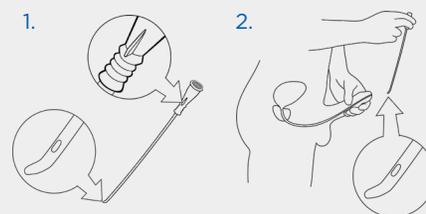

\* UNE VRAIE DIFFÉRENCE

Chez Wellspect, nous estimons les personnes responsables de notre succès en tant que fournisseur majeur de produits innovants dans les troubles urinaires telle que la marque LoFric®. Grâce aux milliers d'utilisateurs et de professionnels de santé qui inspirent nos solutions innovantes à travers le monde, nous savons que travailler ensemble est le meilleur moyen d'améliorer la prise en charge de la continence, offrant à nos utilisateurs plus de temps pour leur vie. En nous appuyant sur plus de 35 années d'amélioration de la qualité de vie, nous œuvrons chaque jour passionnément à faire toujours mieux pour les utilisateurs de nos produits et services. **Wellspect. Une vraie différence.**

[wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)